

Flächendesinfektionsreinigerkonzentrat für medizinische Einrichtungen, aldehyd- und phenolfrei

- Produktinformation:** megroCID ist ein Konzentrat zur Desinfektion und Reinigung von Oberflächen, Fußböden und Gebrauchsgegenständen in allen medizinischen Bereichen.
- für allgemeines Inventar in medizinischen Einrichtungen, Behandlungsplätze, besonders gut für Behandlungseinheiten und Kunstleder geeignet.
 - für Hand- und Winkelstücke im Dentalbereich
 - hohe Materialverträglichkeit – für Gegenstände aus Glas, Porzellan, Metall, Gummi, Holz, Aluminium und Acrylglas.
 - aldehyd- und phenolfrei
- Zusammensetzung:** 100 g enthalten:
 3,33 g Didecyldimethylammoniumchlorid,
 6,66 g Quaternäre Ammoniumverbindungen,
 Benzyl-C12-16-alkyldimethyl-, Chloride.
 Enthält nichtionische Tenside < 5 %. Die im Produkt enthaltenen Tenside sind biologisch abbaubar nach Detergenzienverordnung.

Wirkungsspektrum und Einwirkzeit:

	0,5 % (5 g/L)	1 % (10 g/L)	2 % (20 g/L)	2,5 % (25 g/L)	7,5 % (75 g/L)
Bakterizid, levurozid		60 Min.	30 Min.	15 Min.	1 Min.
Viren					
HBV/HCV/HIV			15 Min.	5 Min.	1 Min.
Vaccinia			15 Min.	5 Min.	30 Sek.
Influenza			15 Min.	5 Min.	30 Sek.
Polyoma-/Papova			30 Min.		2 Min.
Rota	1 Min.				30 Sek.

- Anwendung:** **Gemäß Medizinproduktegesetz (MPG):** Zur Desinfektion und Reinigung von nichtinvasiven Medizinprodukten.
Gemäß Biozidprodukte-Verordnung (BPR): Zur Desinfektion und Reinigung von Oberflächen und Inventar in medizinischen, industriellen, privaten und öffentlichen Bereichen.
- Zur vollständigen Benetzung die Anwendungslösung gleichmäßig auf die Fläche aufbringen. Kein Nachwischen erforderlich. Produkt nicht zusammen mit herkömmlichen Haushaltsreinigern verwenden, um Klebeeffekte zu vermeiden. Beim Ansetzen der Gebrauchslösung zuerst Wasser, dann Konzentrat auffüllen. Als 7,5% Konzentration auch als Schaum applizierbar.

- Besondere Hinweise:** **Gefahr** Quaternäre Ammoniumverbindungen, Benzyl-C12-16-alkyldimethyl-, chloride Didecyldimethylammoniumchlorid Alkohole, C9-11, verzweigt, ethoxyliert. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLÜCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen. Nur zur professionellen Anwendung.

2.000 ml Flasche	284.2000
5 Liter Kanister	284.5000

baua Reg.-Nr. N-54968



Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.
 Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.